

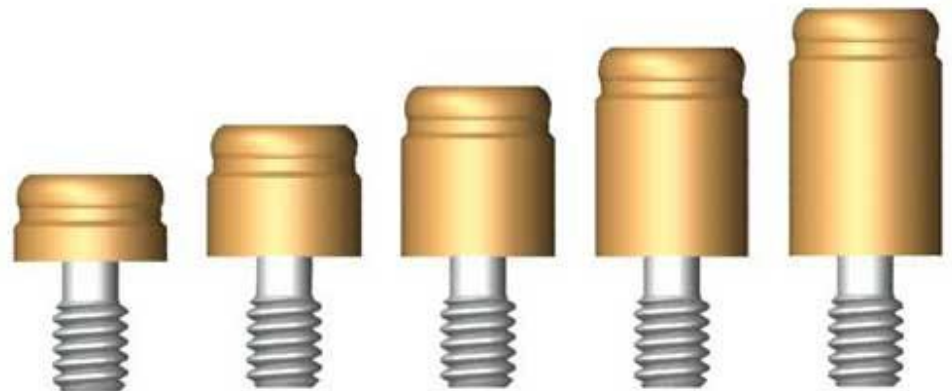
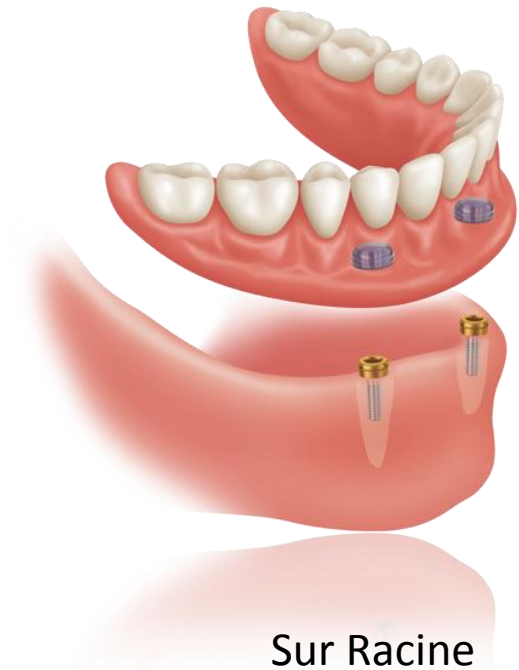


Sodimed, Distributeur de Zest Anchors en France vous présente Le Locator™

- Un attachement de renommée internationale
 - Une compatibilité avec la plupart des marques d'implants
 - Un recul clinique satisfaisant
 - Plusieurs applications (Implant, Racine & Barre)
- SODIMED vous propose :
 - Un stock permanent et une livraison dès le lendemain matin
 - Un prothésiste conseil pour vous aider
 - Un site internet comme support : www.sodimed.com
 - Une seule ligne : 04.90.85.29.00

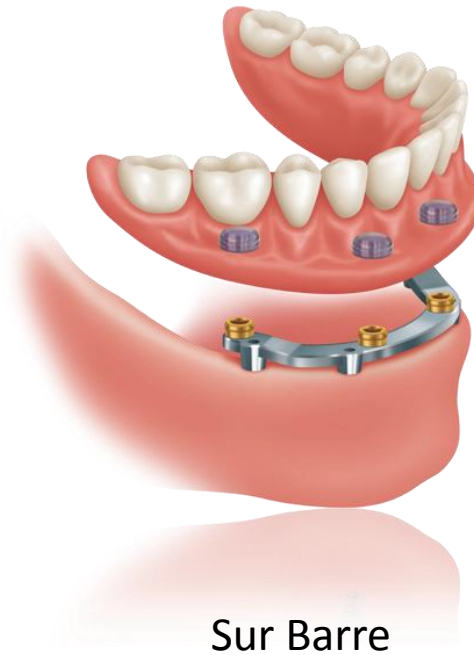

Les applications du Locator™

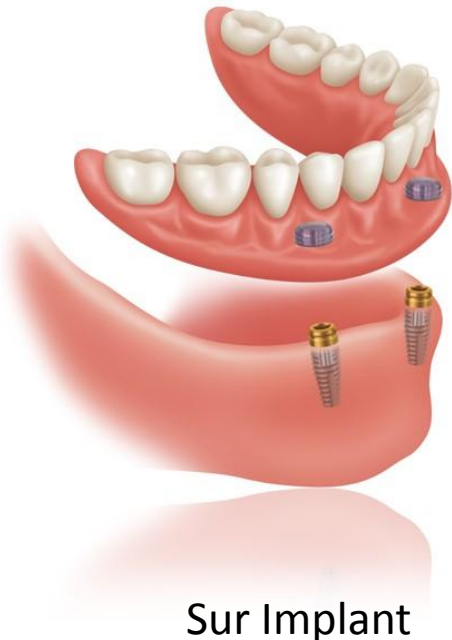


Son secret : rattrapper les divergences




A ne pas confondre

- Statique
- Non résilient
- Le boîtier ne pivote pas

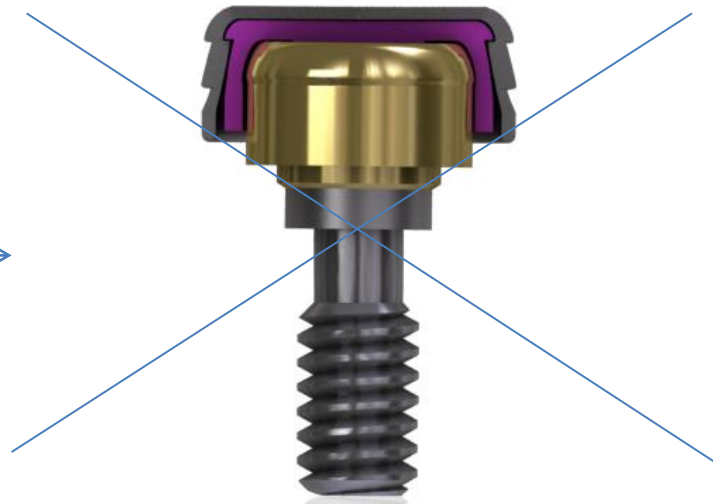

Sur implants 3 points essentiels



- Le choix du pilier*

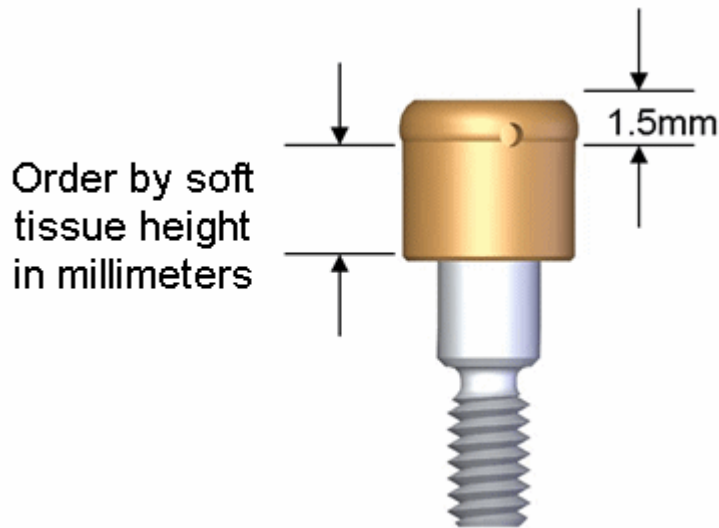

+

- Kit prothétique

Réf 8519
Ou 8540

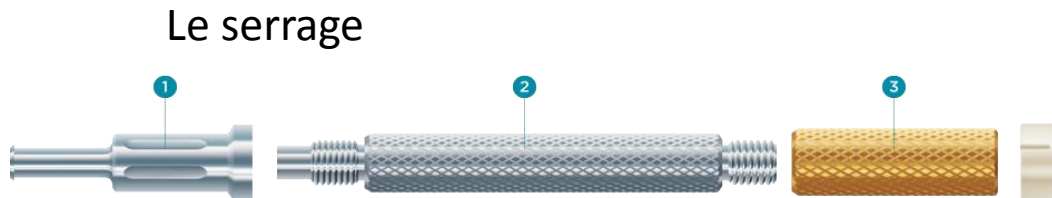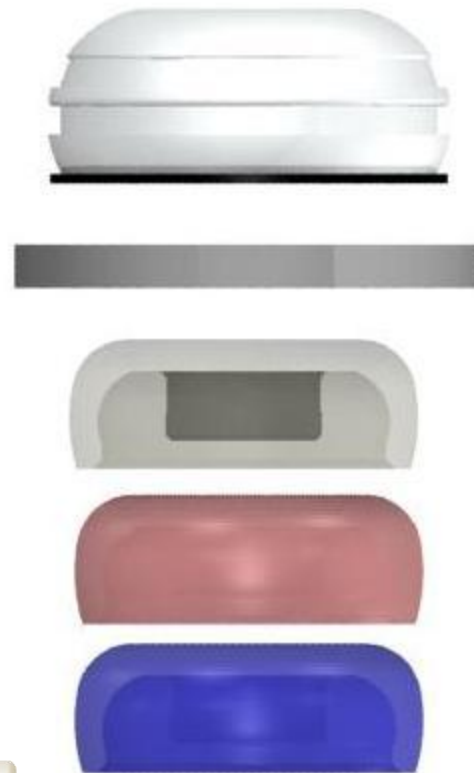

Réf 8393

* Chaque marque a sa propre référence

Sur implants, la prise d'empreinte

- Transferts



Réf 8505

- Analogue



Réf 8530

L'utilisation des transferts & Analogues ne sont pas obligatoires, cependant leurs utilisations ne sont pas négligeables. Meilleure polymérisation, moins de stress au cabinet, un meilleur placement du kit prothétique

Le choix du kit prothétique en fonction de la divergence

LOCATOR MALES



1.5 lbs




3 lbs



5 lbs

EXTENDED RANGE MALES

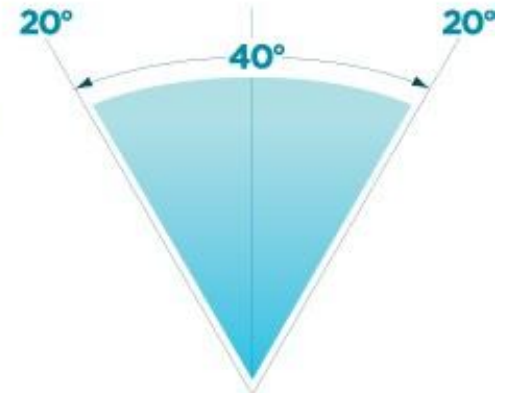

0 lbs



1 lbs



2 lbs




4 lbs

Réf 8519


Réf 8540

Diagram illustrating the assembly of a 30 N.cm torque wrench. The process starts with a long, thin, braided metal tube (labeled '1') being inserted into a larger, thicker, braided metal tube. The assembly is then shown in three stages: 1) The tube is inserted into a larger tube. 2) A blue cap is placed over the end of the tube. 3) A blue cap is placed over the end of the tube. The final assembly is shown with a blue cap and a blue cap. The torque wrench is labeled '30 N.cm'.

Locator sur barre 3 techniques

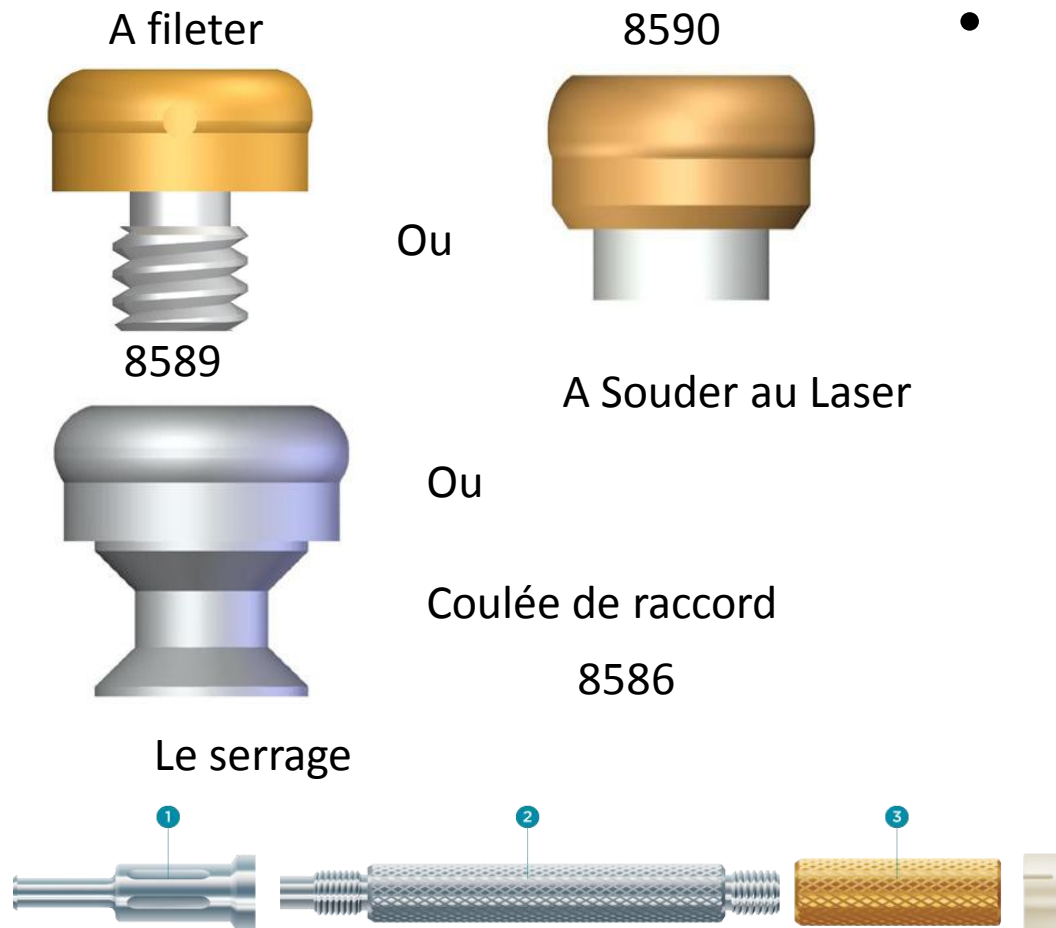


- Kit prothétique

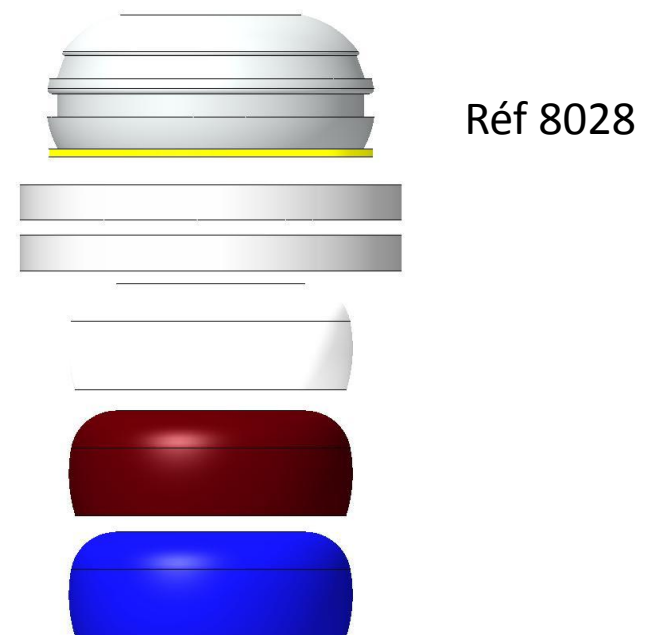

Réf 8393

Attention existe en 2.56 et 2 mm à fileter

Les outils pour Locator sur Barre

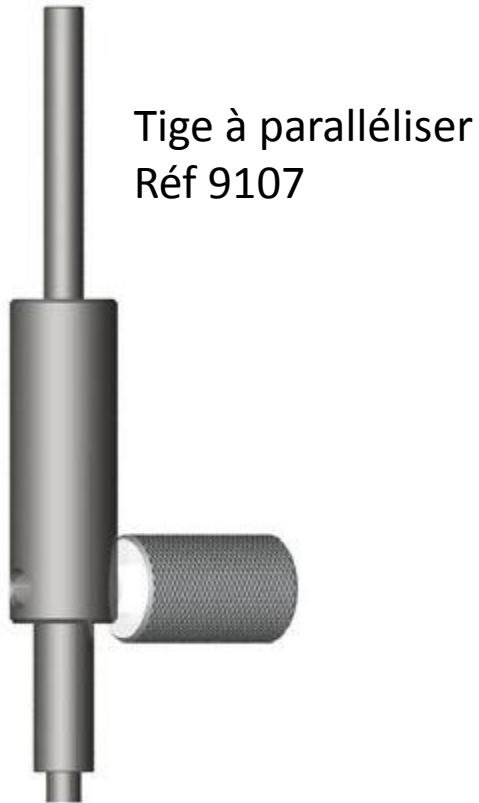

Foret
Réf 9102




Taraud
Réf 9104



Outils utilisés pour Méthode de filetage

Sur Racine 2 méthodes

- Direct dans la racine

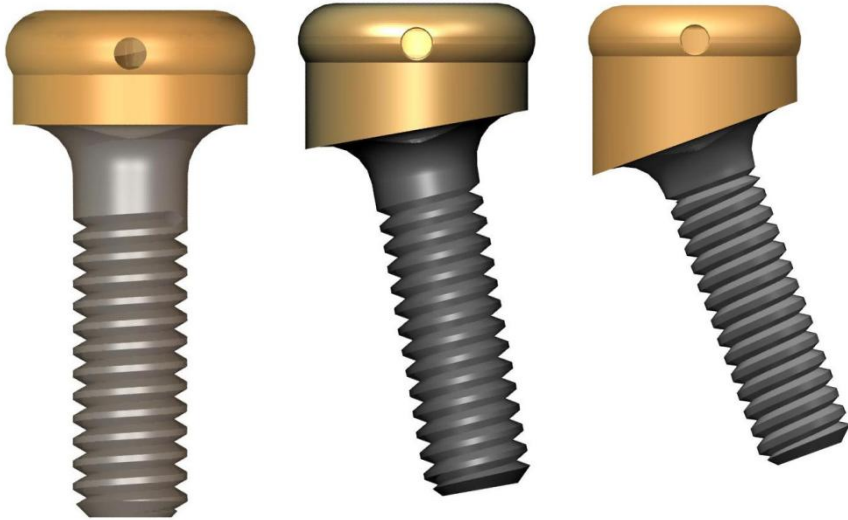

0°

8520


10°

8521

20°

8522

Le serrage

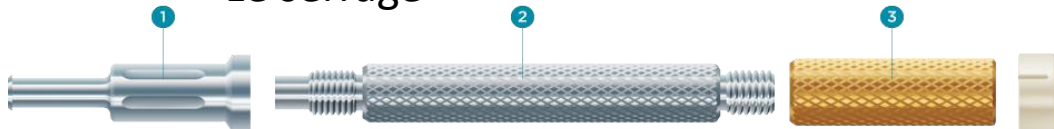

- Coulée de raccord

Réf 8528



Ou

Réf 8519



+



Réf 8393


Kit prothétique

Les outils pour le Locator direct dans la racine

Fraises de préparation radiculaire



Réf 8924
Fraise de profondeur

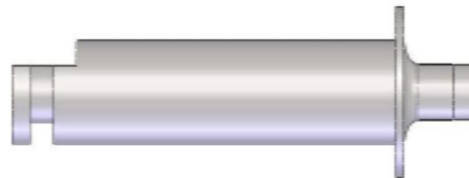

Fraise d'évasement
Réf 8922